### **URGO**

# ¿DOLOR MENSTRUAL? ¿ENDOMETRIOSIS?

URGO Parche de Electroterapia Recargable para Dolores Menstruales

## Solución no medicamentosa y sin efectos secundarios\* para el alivio del dolor



CN: 203577.5 Producto Sanitario Parche de Electroterapia preprogramado indicado para el alivio de **dismenorreas primarias** y dolores pélvicos crónicos (ej. **endometriosis**):

- √ Acción antidolor inmediata y duradera
- ✓ Sin efectos secundarios\*
- ✓ Clínicamente testado











La Electroterapia es un método que utiliza una corriente eléctrica de baja tensión y que estimula específicamente las fibras nerviosas no nociceptivas para aliviar el dolor.

#### 3 programas adaptados



#### **Combinado**

Combina ritmos de ALTAS con bajas frecuencias (100Hz, 80Hz y 60Hz) en modo continuo o discontinuo.

DOLORES MENOS INTENSOS ALIVIO RÁPIDO Y DURADERO



#### Convencional continuo

Estimulación de ALTA frecuencia (100Hz) que potencia el efecto "compuerta".

DOLORES INTENSOS ALIVIO RÁPIDO DEL DOLOR



#### Convencional discontinuo

Estimulación de ALTA frecuencia (85Hz) en modo discontinuo que potencia el efecto "compuerta" y la liberación de endorfinas, evitando la habituación.

> DOLOR CRÓNICO ALIVIO RÁPIDO DEL DOLOR <u>CAUSADO P</u>OR

> > **ENDOMETRIOSIS**



¿CÓMO FUNCIONA?

#### **CLINICAMENTE TESTADO®**

Reduce a la mitad el dolor menstrual después de 30 minutos de aplicación del parche TENS



93% descenso en el consumo de analgésicos

#### Alivio rápido y duradero



#### 20 minutos

3/4 de la aplicaciones produjeron una reducción del dolor en los primeros 20 minutos



#### 7h45 de alivio

de media, la duración del alivio es 7h45.

de las pacientes experimentaron reducción del dolor

#### ✓ Excelente tolerancia<sup>(2)</sup>

#### Opinión de usuarias y satisfacción general

95%	comunicaron una mejora en su dolor
95%	lo recomendarían
100%	lo encuentran fácil de usar
92%	lo usarían de nuevo y estarían dispuestas a comprarlo

#### Resumen

Este estudio clínico demuestra que Urgo Parche de Electroterapia Recargable para Dolores Menstruales es rápido v ofrece un efecto duradero en la reducción de dolores menstruales. Representa una solución no medicamentosa efectiva y bien tolerada que puede ser combinado con o reemplazar los tratamientos farmacológicos en la gestión del dolor menstrual y el dolor pélvico crónico (ej. endometriosis). Su uso permite una reducción en el consumo de analgésicos limitando sus efectos secundarios. Las pacientes se sienten satisfechas con su efectividad, encontrándolo fácil de usar y el 95% de ellas lo recomendarían.

#### Metodología del ensayo

#### Población



37 mujeres de entre 20 a 43 años



que padecen dismenorrea primaria y necesitan medicación

#### Metodología



Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, cruzado contra Sham (dispositivo placebo visualmente idéntico)



Sujetos utilizando el dispositivo desde su casa e introduciendo los datos durante 2 periodos de 28 días en la aplicación Neustrial



- Grupo 1: 1° ciclo menstrual con TENS y 2° ciclo menstrual con Sham
- Grupo 2: 1° ciclo menstrual con Sham 2° ciclo menstrual con TENS

El uso de analgésicos durante el estudio estaba permitido en caso de necesidad

1) Estudio clínico monocéntrico, controlado, aleatorio, doble ciego y cruzado, contra Sham (dispositivo placebo) para evaluar la eficacia y seguridad del dispositivo de neuroestimulación eléctrica transcutanea (TENS) en mujeres con dismenorrea primaria - 2019- 37 pacientes. Estudio clínico realizado para los programas 1 y 2 de URGO
Parche de Electroterapia Recargable para Dolores Menstruales. Publicado en Abril de 2019 Theramax IPSOS.

2) 2 efectos adversos ligeros y breves registrados vinculados al uso del parche (1 picor ligado a un uso repetido y 1 nauseas durante el primer uso)

Para saber más sobre la electroterapia y URGO Parche de Electroterapia Recargable para Dolores Menstruales, por favor visita nuestra web: www.urgo.es

URGO Parche de Electroterapia para Dolores Menstruales. Indicado para: Dolores pélvicos (parte baja del abdomen) o crónicos (ej. endometriosis) y para las dismenorreas primarias, es decir, los dolores ligados a la menstruación que no son causados por una patología ginecológica subyacente. Leer atentamente las instrucciones y las precauciones de uso antes de su utilización. En caso de duda, consulte a su médico o su farmacéutico. Producto sanitario - cumple normativa vigente. Representante autorizado: Shanghai international holding corp GmbH (Europa). Distribuidor: Laboratorios URGO Healthcare.